

## X Taffix

In studi di laboratorio è stato rilevato che Taffix è altamente efficace nel bloccare vari virus respiratori tra cui la SARS-CoV-2.

Per proteggere contro virus trasmessi per via aerea, Taffix™ deve essere usato prima dell'esposizione in un ambiente ad alto rischio dove i virus (trasmessi per via aerea) possono essere presenti come luoghi pubblici (ad es. supermercati, farmacie, scuole, palestre, voli, ecc.) oppure prima dell'incontro con chiunque sia estraneo ai membri del nucleo familiare.

Taffix™ può essere applicato fino a 3 volte al giorno.

### Come agisce Taffix™?

Taffix™ è uno spray nasale in polvere, nel naso la polvere si trasforma in gel creando una barriera attiva che scherma, protegge e blocca i virus trasmessi per via aerea che possono circolare in spazi aperti, aerei, treni, grandi centri commerciali e trasporti pubblici.

Se è necessario l'uso simultaneo di un altro spray nasale, Taffix™ deve essere riapplicato in seguito, in modo che la barriera creata non venga ostacolata.

Taffix™ può essere utilizzato in aggiunta ad altri trattamenti, come parte della strategia di terapia combinata nella lotta contro i virus. Ad esempio, Taffix™ può essere utilizzato in aggiunta all'uso di mascherina e guanti.

Taffix™ non è un farmaco e non provoca sonnolenza.

### Chi può usare Taffix™?

- Taffix™ è indicato per adulti, atleti e bambini dai 12 anni in su.

### Controindicazioni

- Non utilizzare questo prodotto se si è sensibili alla cellulosa, all'acido citrico o al cloruro di benzalconio.
- Consultare il medico prima di utilizzare Taffix™ su bambini sotto i 12 anni, donne in gravidanza o in allattamento.

### ⚠ Attenzione:

- Non usare dopo la data di scadenza o 6 mesi dalla prima apertura - a seconda di quale dei due casi si verifichi per primo.
- Per evitare contaminazioni, non utilizzare questo prodotto per più di una persona.
- Può essere utilizzato fino a 3 volte al giorno.
- Tenere lontano dalla vista e dalla portata dei bambini
- Evitare il contatto con ferite aperte.
- Evitare il contatto con gli occhi. Se la polvere entra in contatto con gli occhi, sciacquare con acqua.
- Non sciacquare il flacone con acqua o altro liquido perché questo potrebbe bloccarlo.
- Non utilizzare in caso di rottura del sigillo di garanzia.
- Chiudere sempre il tappo.
- Sono stati segnalati pochissimi casi di reazioni allergiche a questo prodotto. La maggior parte delle segnalazioni ricevute sono state: ostruzione del naso, naso che cola, starnuti, mal di gola. Se si verificano reazioni

più gravi di queste - allora l'uso del prodotto deve essere interrotto immediatamente e se i sintomi persistono, consultare il proprio medico.

- Premere delicatamente il flacone per evitare un'eccessiva emissione di polvere

### Modalità di conservazione del Taffix™

- Conservare a temperatura ambiente o tra 5°C e 30°C (41°F ~ 86°F).
- Non refrigerare o congelare.

### Modalità d'uso del Taffix™

Per difendersi da virus e allergeni e mantenere una barriera efficace contro di essi, Taffix™ può essere applicato fino a 3 volte al giorno.

**Ricordate - La bottiglia di Taffix™ non può essere condivisa con altre persone. Contrassegna la tua bottiglia ed evita di dividerla con altre persone per evitare la potenziale trasmissione di virus o germi.**

Il flacone di Taffix™ contiene 1000 mg di polvere (circa 200 dosi). Una volta applicato, Taffix™ diventa efficace dopo un minuto ed è efficace per circa 5 ore.


Prima di iniziare ad usare Taffix™ - potete fare pratica premendo delicatamente il flacone puntandolo nell'aria e poi seguire le modalità d'uso riportate di seguito:

### Come preparare per l'uso un Taffix™ nuovo?

- Togliete il vostro spray nasale Taffix™ dalla confezione
- Agitate il flacone di Taffix™
- Testate lo spray nell'aria per due volte
- Il Taffix™ è ora pronto per l'uso

### Come usare il Taffix™?

Ogni volta che usate Taffix™ seguite le sottostanti istruzioni

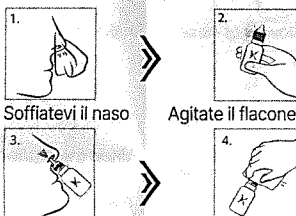

Soffiatevi il naso

Agitate il flacone

Spruzzate 1-2 volte in ciascuna narice

Pulite il flacone.

Al primo uso potreste sentire un formicolio o una sensazione di bruciore nel naso in particolare modo se la mucosa nasale è sensibile o infiammata.

Potreste anche sentire una certa irritazione in particolare modo se le mucose nasali sono infiammate o irritate. Questo passerà velocemente.

Alcune persone potrebbero avere una lieve sensibilità o il naso tappato, ciò è normale ed è la percezione data dalla barriera creata da Taffix™. Se si avverte un disagio continuo ci si può lavare il naso con acqua calda fino a quando non si avverte un sollievo. Se dopo l'applicazione di Taffix™ il disagio è grave, consultare il proprio medico.

**Il flacone di Taffix™ deve essere usato da una sola persona, dividerlo con altri potrebbe esporli a infezioni!**

**Composizione chimica:** Ipromellosa (HPMC)(89.9%), Acido citrico (6%), Citrato di sodio (4%), Cloruro di benzalconio (0.1%) e Mentolo (<0.1%)

**Taffix™ e' disponibile in diverse tipologie:**

- REF 1841600 Taffix™ - 1** confezione di 1g di polvere
- REF 184160 2 Taffix™ da viaggio - 1** confezione di 0.7g di polvere
- REF 184160 3 Taffix™ Famiglia - 4** confezioni di 1g di polvere ciascuna ( **REF** 1841600)

**Nasus Pharma Ltd.**  
Harakevet 29 Tel Aviv, 6618306, Israel  
**Tel:** +9723-573-6632  
**Fax:** +9723-573-6664  
**Email:** info@nasuspharma.com  
**Website:** www.nasuspharma.com  
**Prodotto in Israel**

**Per informazioni: ATID SRL**  
Via Nomentana 305, 00198, Roma, Italia  
**Tel:** +39 0686293011  
**Email:** taffix@atidtech.com

**Numero di registrazione in Israel MOH (AMAR):** 33010001

**EC REP Mdi Europa GmbH**  
Langenhagener Str. 71, D-30855 Langenhagen, Germany  
**Tel:** +49 511 39089530  
**Email:** info@mdi-europa.com  
**Website:** mdi-europa.com

### Glossario dei simboli:

	Produttore legale
	Simbolo CE indicante che il prodotto rispetta la Direttiva del Consiglio 93/42/EC (MDD)
	Attenzioni, consultare i documenti allegati
	Consultare le istruzioni per l'uso
<b>LOT</b>	Numero del lotto
<b>REF</b>	Numero di catalogo
<b>EC REP</b>	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Non usare se la confezione e' danneggiata
	Temperature minime e massime di conservazione
	Tenere lontano dalla luce solare
	Data di scadenza (nel formato: YYYY-MM-DD)
	Conservare all'asciutto